



Richtlijn endodontologie

Richtlijn voor het gebruik van blue[®]m oxygen fluid bij endodontische behandeling

Vorbereiding:

- Open het element en verwijder de geïnfecteerde pulpa.
- Vijlen met de endofile. Tijdens het vijlen tussendoor steeds spoelen met blue[®]m oxygen fluid.

Behandeling:

1. Na het prepareren van de kanalen, blue[®]m oxygen fluid weer in de kanalen aanbrengen en 20 seconden Ultrasoon activeren (met bijv. Endo Activator)
2. Ververs daarna de blue[®]m oxygen fluid weer.
3. Herhaal stap 1 driemaal.
4. Na de laatste ultrasone reiniging, nogmaals spoelen met blue[®]m oxygen fluid.
5. Na het spoelen worden de kanalen gedroogd met paperpoints en gevuld.

We adviseren om de Navitip van Ultradent te gebruiken voor de irrigatie van de kanalen. Gebruik ongeveer 10 à 20 ml blue[®]m oxygen fluid per kanaal.

Extreme druk tijdens irrigatie of het vastlopen van de irrigatienaald in het wortelkanaal kan leiden tot het doorpersen van grote volumes van de irrigatievloeistof naar de apicale weefsels. Als dit gebeurt met natriumhypochloriet zal dit leiden tot weefselnecrose. blue[®]m oxygen fluid is echter weefselvriendelijk en bij doorpersen zal geen weefselnecrose ontstaan, maar hooguit leiden tot een zwelling die meestal binnen 1 dag weer verdwijnt.